

## 検査手順

### STEP 1

キャップを外します。



### STEP 2

被検査者は、カップの1/3から半分くらいまで尿を入れます。

※しっかり蓋が閉まりますので尿漏れの心配がありません。



### STEP 3

カップの蓋をしっかりと締めます。ウィンドウに貼られている青いラベルをはがします。




### STEP 4

5分後に結果を確認します。検査結果は、少なくとも60分間は安定しています。




- 陰性の結果は、すぐに表示されます。
- 陽性の結果は、5分後に確認できます。

## 結果の確認

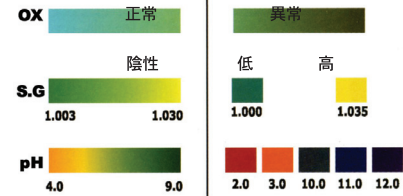

- 3~5分後に不純物検査ストリップを確認します。同梱の色図を参照して、正確に確認してください。

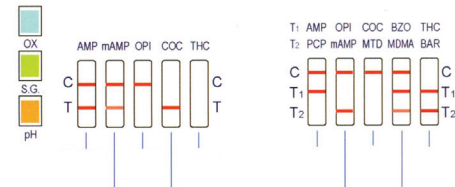

# STAT<sup>+</sup> CUP

## スタットカップ検査方法

# ITEMS INC.

株式会社 アイテム